

INNO-CE®

MOIST 1.5
BI-DENS 2.5

Hydro Booster
Skin Booster


**DESCUBRE EL ENORME POTENCIAL
DE LA BIOMODULACIÓN CUTÁNEA**




Innovation
from
experience



INNOAESTHETICS

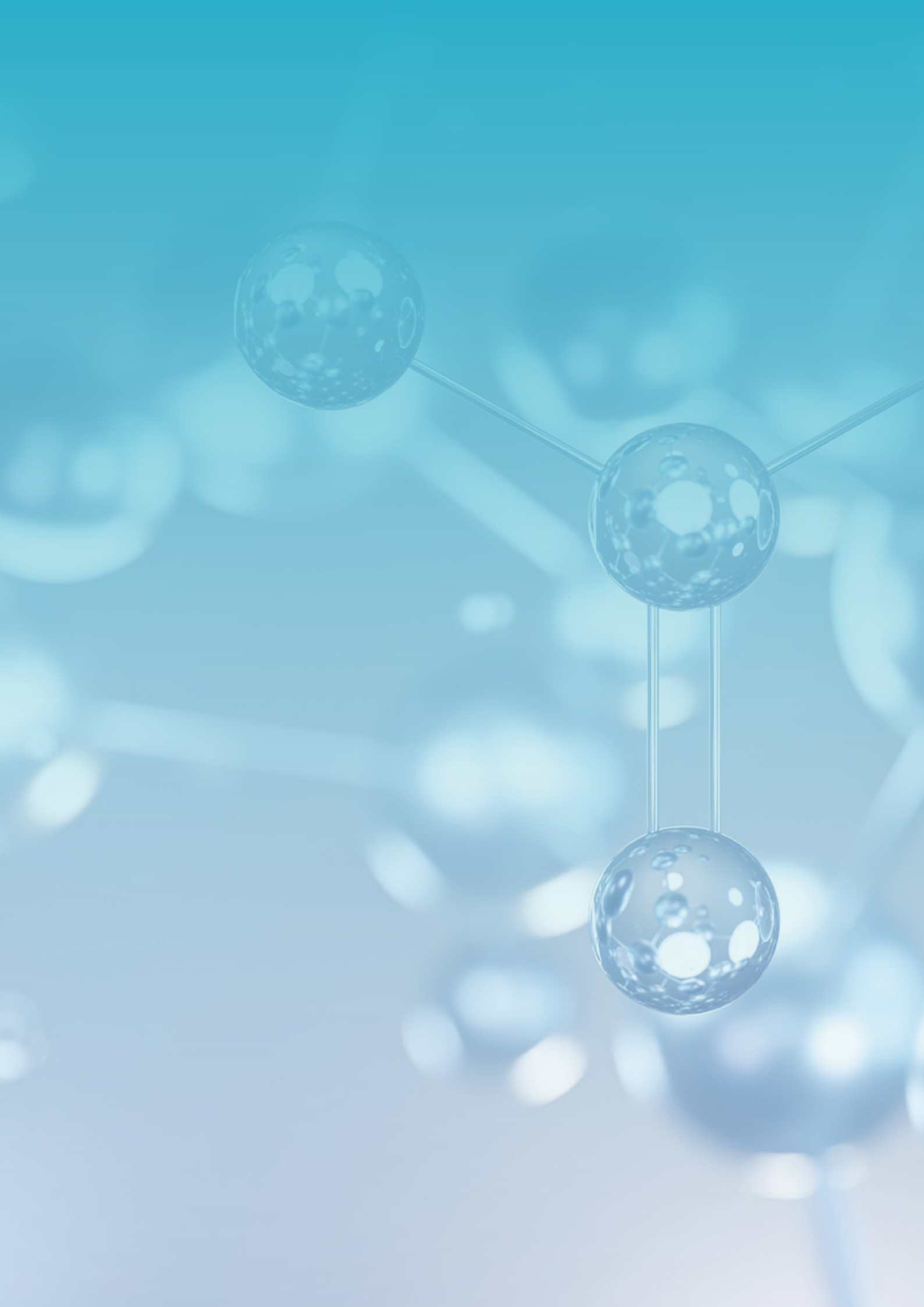

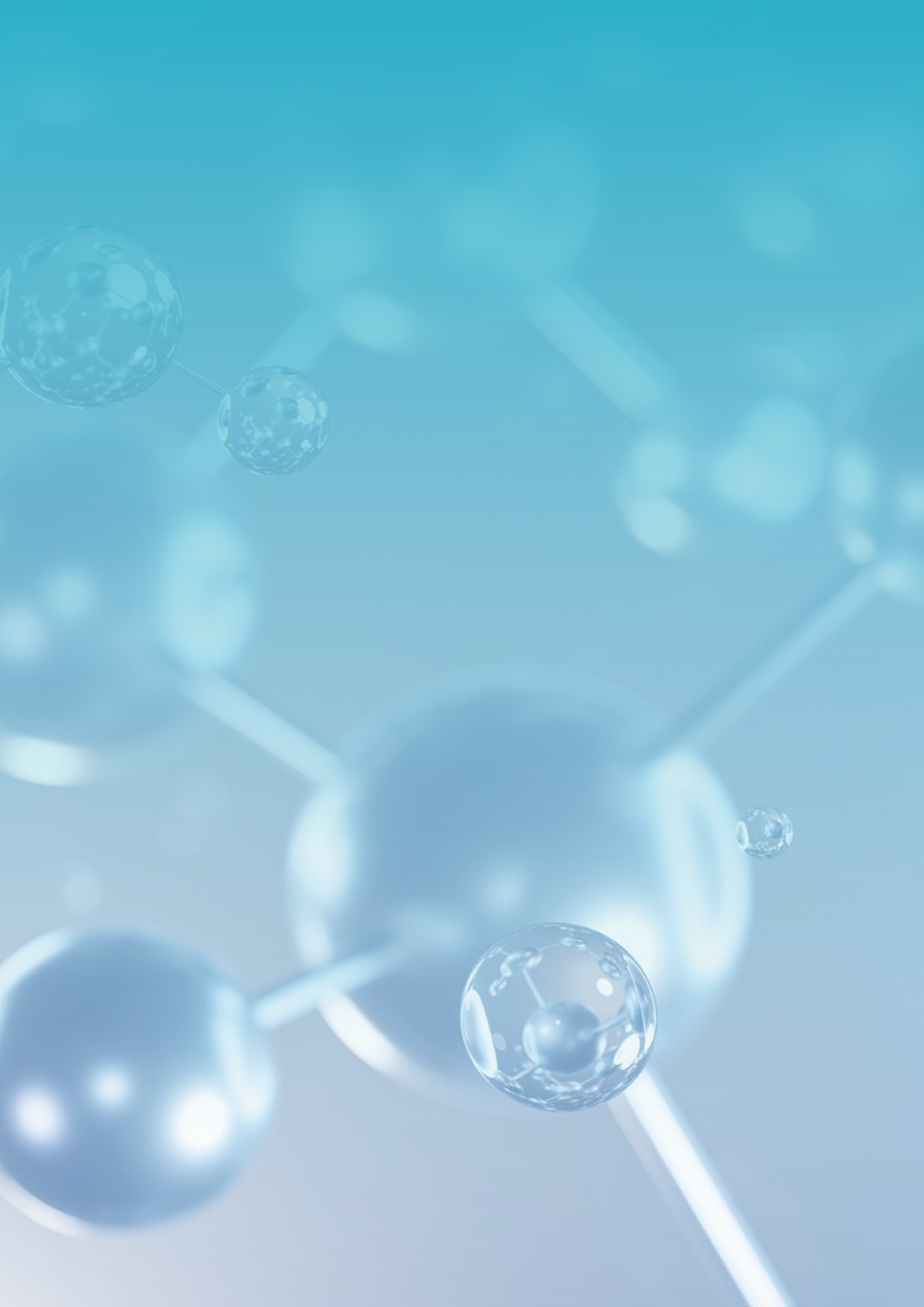


MOIST 1.5 BI-DENS 2.5

INNOVANDO DESDE LA EXPERIENCIA

INNOAESTHETICS presenta dos **biomoduladores** cutáneos hechos de **Ácido Hialurónico de alto peso molecular**.

Destacan por ofrecer una de las concentraciones de ácido hialurónico más altas del mercado.

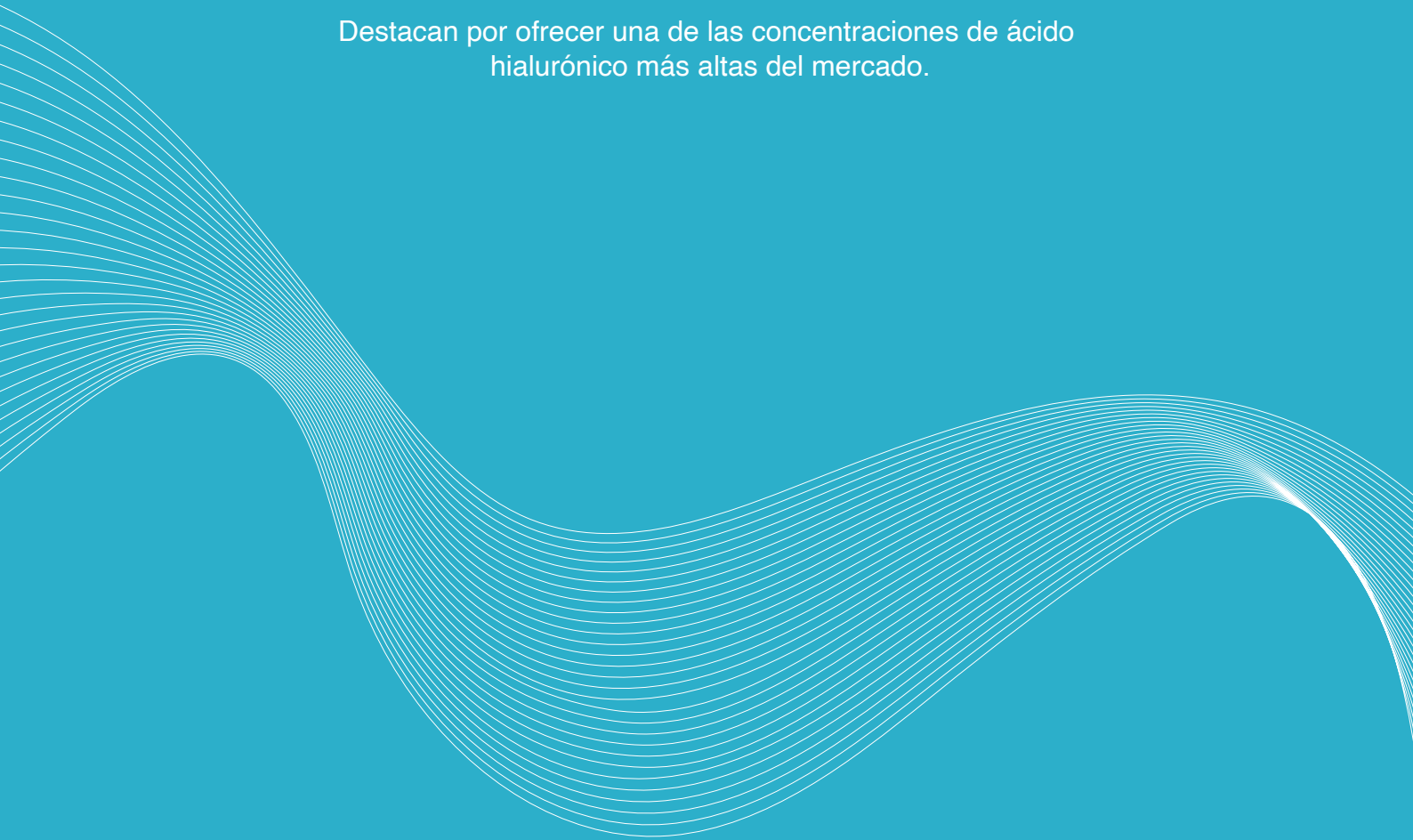

01/ ¿QUÉ ES LA BIOMODULACIÓN?

La biomodulación se describe como el proceso de modificar, regular, o influenciar los procesos biológicos.

En el marco de la medicina estética, se centra en restaurar la matriz extracelular de la piel para promover la producción de colágeno y elastina, y mejorar la función celular. El Ácido Hialurónico de alto peso molecular es ideal para ello, siendo capaz de restaurar la hidratación cutánea y de mejorar la salud de la piel de forma notable. Este efecto doble se conoce como **skin boosting** e **hydro boosting**.

Este enfoque busca bio-revitalizar la piel desde dentro, mejorando de forma significativa la textura de la piel y aportando efectos duraderos.

02/ ÁCIDO HIALURÓNICO: MÁS DE 50 AÑOS DE EFICACIA PROBADA

El Ácido Hialurónico (AH), principal constituyente de la matriz extra-celular, sigue siendo hoy día el ingrediente con mayor efecto estimulador del mercado.

En INNOAESTHETICS, seguimos innovando con el Ácido Hialurónico para el rejuvenecimiento cutáneo porque reconocemos que sus beneficios son irremplazables.

03/ NUESTRO ÁCIDO HIALURÓNICO

- Estabilizado para una degradación más lenta
- Libre de agentes reticulantes
- Alto Peso Molecular
- Efectos duraderos
- Resultados naturales
- Puro y seguro

MOIST

1.5

HA
15mg/ml

Hydro booster avanzado compuesto de una alta concentración de ácido hialurónico de alto peso molecular.

Hidrata intensamente

- Revitaliza
- Mejora la elasticidad
- Incrementa la luminosidad
- Suaviza la piel



Concentración:
15 mg/ml



Peso molecular
2,3 MDa

BI-DENS

2.5

HA
25mg/ml

Skin booster compuesto de dos pesos moleculares (alto y muy alto) para una precisa integración en la matriz extracelular, y una potente estimulación del colágeno.

Skin Booster

- Incrementa la densidad cutánea
- Rejuvenece
- Atenúa las líneas de expresión
- Reafirma la piel
- Hidrata profundamente



HIGH &
VERY HIGH
MOLECULAR
WEIGHT



Concentración:
25 mg/ml



Peso molecular
1,8 MDa and 4MDa

Ambos INNO INNO-CE® MOIST 1.5 e INNO-CE® BI-DENS 2.5 se presentan en **jeringuillas de 3ml precargadas**, permitiendo tartar, no tan solo la cara, sino también cuello y escote. Son apropiados para todos los tipos de piel y para diferentes zonas corporales, como brazos y manos.


04/ COMPATIBLES CON WITH INNO-TDS®

INNO-CE® MOIST 1.5 e INNO-CE® BI-DENS 2.5 se pueden mezclar con las siguientes soluciones INNO-TDS® para potenciar sus efectos y mejorar alteraciones específicas de forma rápida y efectiva.

- **INNO-CE® MOIST 1.5 + INNO-TDS® REDNESS**




- **INNO-CE® MOIST 1.5 + INNO-TDS® VITAMIN COMPLEX**

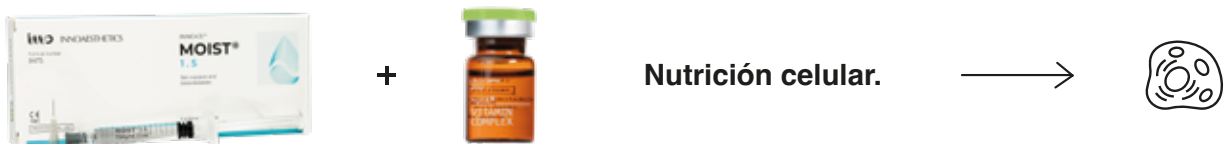

- **INNO-CE® BI-DENS 2.5 + INNO-TDS® PEPT-HA**



- **INNO-CE® BI-DENS 2.5 + INNO-TDS® RESTRUCTURER**

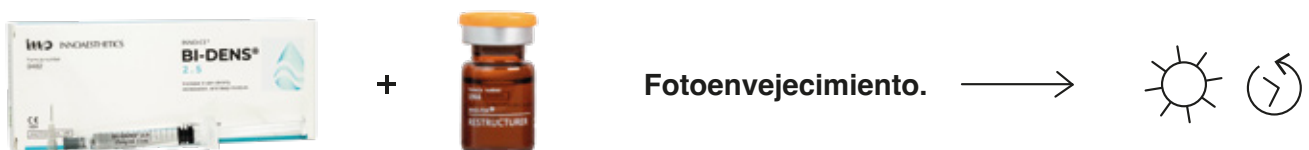

Para mezclar los productos:

- 1º Introducir **2.5ml** de la solución **INNO-TDS®** en una **jeringuilla de 5ml**.
- 2º Tomar la jeringuilla precargada de **INNO-CE® MOIST o BI-DENS**.
- 3º **Conectar las dos jeringuillas**, usando un **conector Luer Lock esteril**.
- 4º Pasar las soluciones de una jeringuilla a la otra varias veces **para que se mezclen**.
- 5º **Repetir tantas veces como sea necesario** hasta que el producto esté bien mezclado.



Escanea para ver la
realización de la mezcla

05/ TREATMENT PROTOCOL

Realizar 3 sesiones con intervalos de 21 a 30 días.
Se recomienda repetir el ciclo una o dos veces al año.

1ª Sesión

21 DÍAS

2ª Sesión

21 DÍAS

3ª Sesión

06/ TÉCNICAS DE APLICACIÓN ESPECÍFICAS

INNO-CE® MOIST 1.5 e **INNO-CE® BI-DENS 2.5** pueden aplicarse mediante mesoterapia tradicional, o mediante dos técnicas de aplicación específicas desarrolladas por el laboratorio: **VPA Technique™** y **Adipoestructuración Facial**, dos innovadores métodos de inyección que potencian los resultados.

VPA Technique™, creada por Dr. Victor García Guevara, combina tres técnicas de inyección en cada sesión. Este método de aplicación consiste en puntos y secuencias específicas adaptadas a las necesidades de cada persona, considerando la dinámica expresiva del paciente.



escanea para
ver la técnica

ADIPOESTRUCTURACIÓN FACIAL, por Dra. Gladys Velasco, es una técnica de rejuvenecimiento que se centra en estimular la producción de colágeno y nutrir los tejidos en áreas específicas para fortalecer los ligamentos que sostienen los depósitos de grasa facial, consiguiendo un efecto lifting espectacular.

VPA TECHNIQUE®




FA
FACIAL ADIPOSTRUCTURING
TECHNIQUE




07/ RESULTADOS

Fotografías antes y después de una paciente tratada con **INNO-CE® MOIST 1.5** mediante **VPA Technique™**, después de **3 sesiones con intervalos de 21 días**.

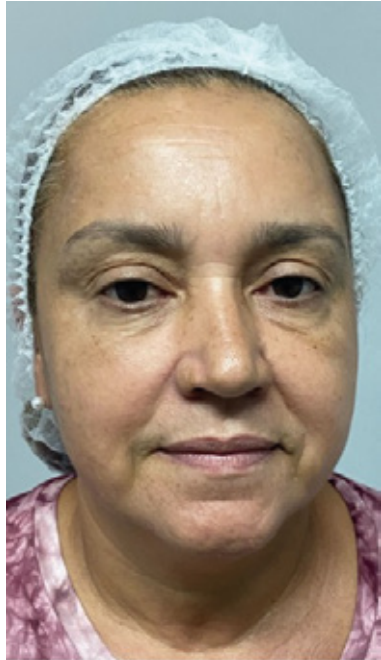


Antes del tratamiento

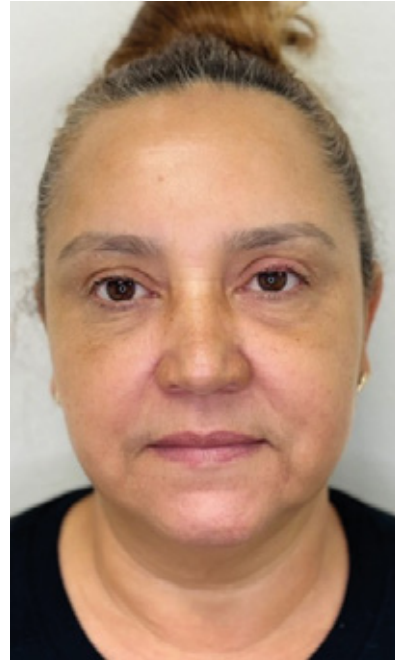

Después de 3 sesiones de tratamiento


Fotografías antes y después de un paciente tratado con **INNO-CE® BI-DENS 2.5** mediante **VPA Technique™**, después de **2 sesiones con intervalos de 21 días**.

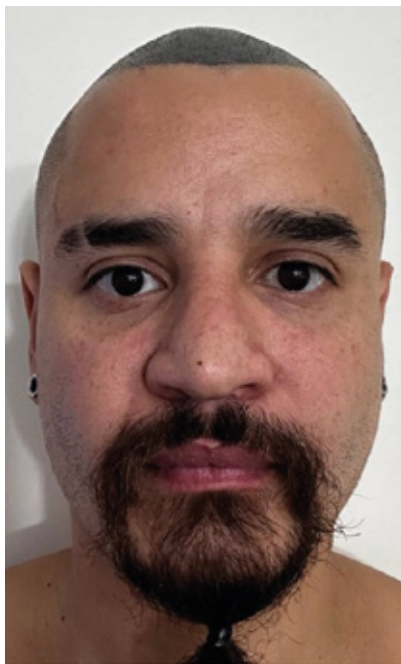



Antes del tratamiento



Después de 2 sesiones de tratamiento

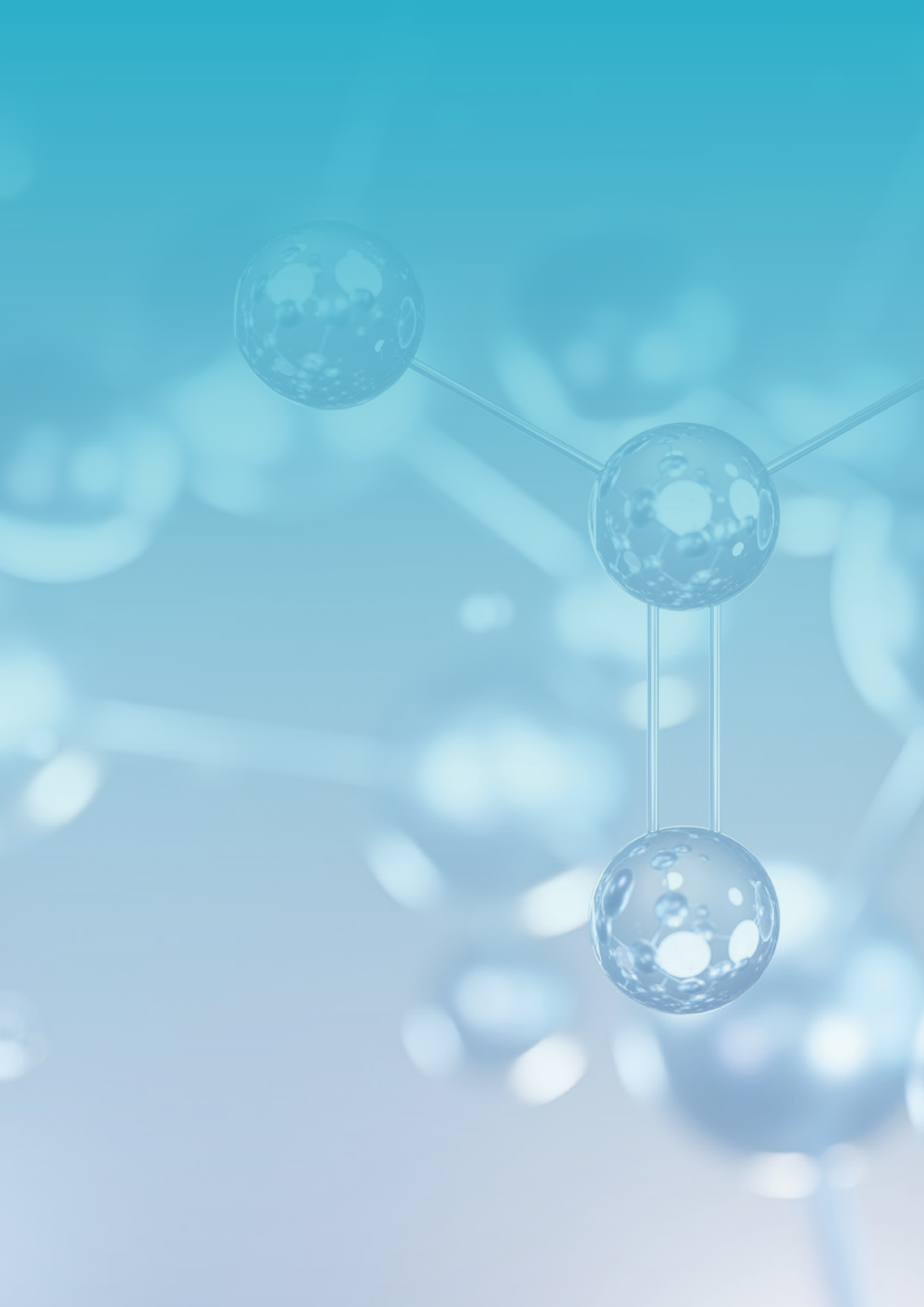

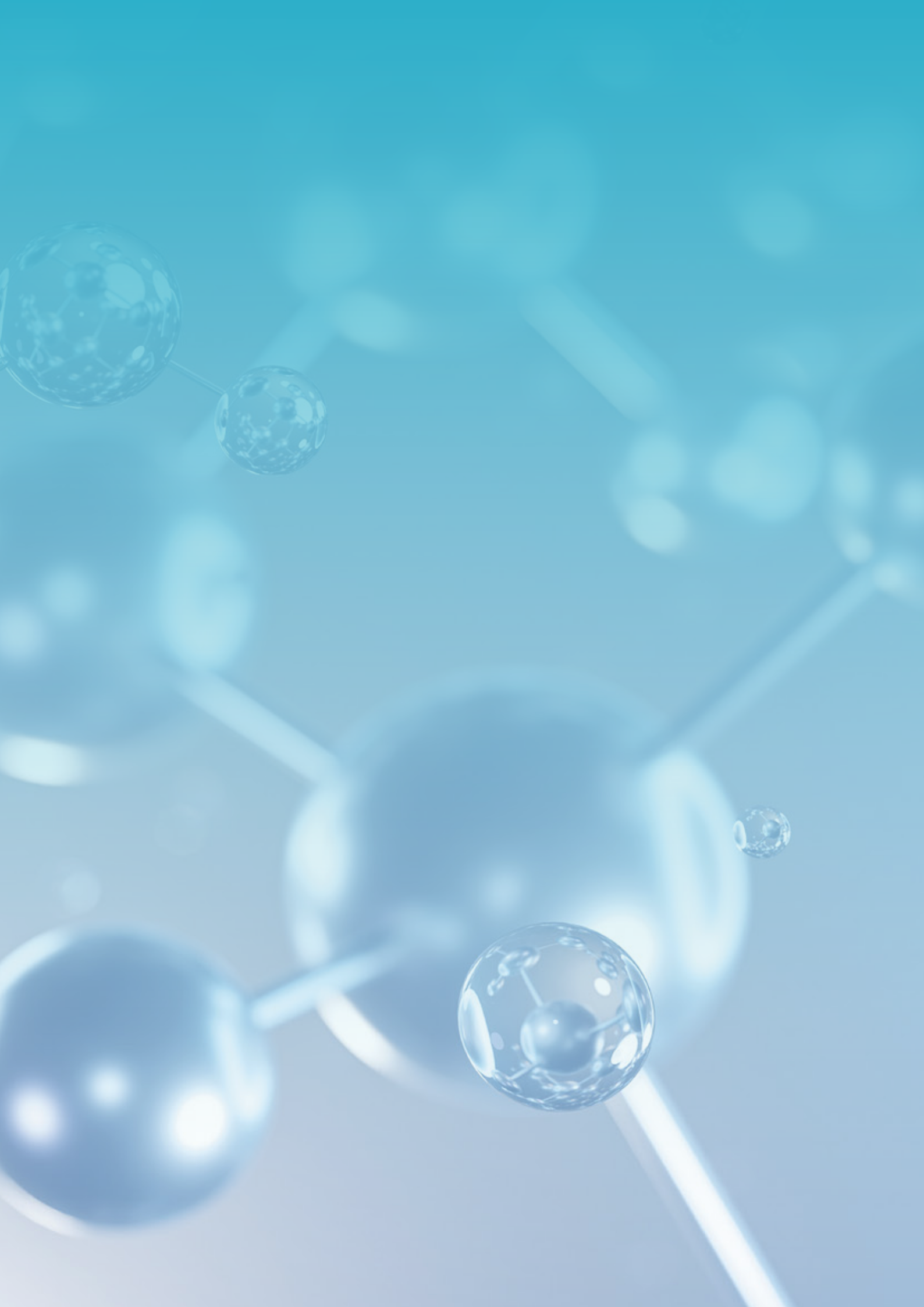

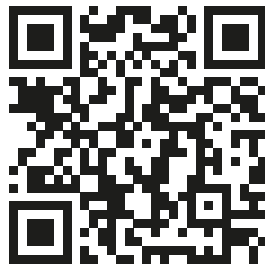

INNOAESTHETICS

www.innoaesthetics.com